

INADINE™

(PVP-I) NON ADHERENT DRESSING

Produktbeschreibung

INADINE™ PVP-I Nichthaftende Wundauflage ist ein äußerlich anzuwendender Wundverband, der mit einer Salbe aus 10% Polyvidon-Iod imprägniert ist. Der Verband enthält ferner Polyethylenglykol und gereinigtes Wasser.

Indikationen

INADINE™ Wundauflage dient dem Schutz von Wunden, auch infizierter Wunden. INADINE™ Wundauflage ist für die Behandlung von ulzerierenden Wunden geeignet und dient ebenfalls der Vorbeugung von Infektionen bei leichteren Brandwunden und leichteren traumatischen Hautabschürfungen.

INADINE™ Wundauflage hat eine anhaltende antiseptische Wirkung, die für eine gewisse Zeit Infektionen vorbeugen, welche durch bakterielle, protozoische und pilzartige Organismen hervorgerufen werden. Bei stark infizierten Wunden kann es mit einer systemischen Antibiose kombiniert werden.

Gegenanzeigen

INADINE™ Wundauflagen nicht anwenden:

- wenn bekannt ist, daß eine Überempfindlichkeit gegen Iod vorliegt (Allergie)
- vor und nach der Verwendung von radioaktivem Iod (bis zum Zeitpunkt der dauerhaften Heilung)
- während der Behandlung eines Nierenleidens
- bei schwangeren und stillenden Frauen
- bei Vorliegen des Duhring-Syndroms (Dermatitis herpetiformis, eine seltene Hautkrankheit).

INADINE™ Wundauflagen nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden:

- bei Patienten mit Schilddrüsenleiden jeglicher Art
- bei Neugeborenen und Babys bis zum Alter von 6 Monaten, da auch deren unverletzte Haut das Polyvidon-Iod aufnehmen könnte
- bei der Behandlung von tiefen ulzerierenden Wunden, Verbrennungen oder großflächigen Verletzungen.

Falls die Behandlung mit INADINE® Wundauflage länger als eine Woche andauert, sollte ein Arzt hinzugezogen werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Wundvorbereitung

1. Öffnen Sie die Sterilverpackung und entnehmen Sie den INADINE™ Wundauflage unter Verwendung einer sterilen Pinzette.
2. Entfernen Sie das erste Schutzpapier.
3. Nehmen Sie den Verband vom verbleibenden Schutzpapier und applizieren Sie ihn direkt auf die Wunde.
4. Bedecken und fixieren Sie den Verband mit einem geeigneten Sekundärverband.

Verbandwechsel

Für eine erfolgreiche Wundtherapie ist es unerlässlich, Schädigungen der intakten Haut zu vermeiden.

1. Wenn INADINE® Wundauflage verblaßt, ist dies ein Zeichen dafür, daß seine antiseptische Wirkung nachläßt und er gewechselt werden sollte. Am Anfang oder bei stark infizierten oder stark sezernierenden Wunden kann die Wundauflage bis zu zweimal täglich gewechselt werden.
2. Beim Verbandwechsel läßt sich der INADINE® Wundauflage leichter entfernen, wenn es an den diagonal gegenüberliegenden Ecken etwas gedehnt und dann von der Wunde abgezogen wird.

HINWEIS: In Deutschland apothekenpflichtig

Nicht anwenden wenn Verpackung beschädigt ist. Nicht wieder verwenden.

Nicht resterilisieren.

“Verwendbar bis“ – siehe Aufdruck auf der Verpackung.

DE AUF DEM ETIKETT VERWENDETE SYMBOLE



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Nicht wiederverwenden.



Nicht erneut resterilisieren.

STERILE R Durch Bestrahlung sterilisiert.



Gebrauchsinformation beachten.

CE 0086 CE-Zeichen und Kennnummer der zuständigen Stelle.



Vorsicht.



Katalognummer.



Verwendbar bis.



Chargennummer.



25°C

Lagern unter 25°C.



Hersteller.

038031S.C
2018-05

©2018 Systagenix Wound Management Limited, Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, UK

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information may exist for Systagenix, Crawford and KCI (Acelity companies) products. Please consult a healthcare provider and product instructions for use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.

Copyright 2019 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. Unless otherwise noted, all trademarks designated herein are proprietary to KCI Licensing, Inc., Systagenix Wound Management, Ltd., or Crawford Healthcare, Ltd. (06/19)