



Το αντιβακτηριακό μέλι Medihoney® είναι ένα τυποποιημένο αντιβακτηριακό μέλι, κύρια *Leptospermum* sp., που έχει επιλεγεί για τις μοναδικές του ιδιότητες καθαρισμού τραυμάτων και αντιβακτηριακού φραγμού.

Το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney® είναι ένα τοπικό παρασκεύασμα που περιέχει 100% αντιβακτηριακό μέλι Medihoney® και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φροντίδα τόσο χρόνιων όσο και οξείων τραυμάτων. Έχει αποδειχτεί ότι είναι κλινικά αποτελεσματικό για:

- την παροχή υγρού περιβάλλοντος επαύλωσης τραυμάτων
- την προστασία του τραύματος με τη δημιουργία ενός φραγμού έναντι παθογόνων τραυματίες συμπεριλαμβανομένων στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά
- παροχή καθαρότερου τραύματος
- ταχεία αφαίρεση της κοκκώσεως
- ελάττωση του κινδύνου λοίμωξης από βακτήρια.

Το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney® είναι ένας μη προσκολλητικός φυσικός επίδεσμος και επαυμένως ελαττώνει το τραυματισμό και τον πόνο κατά τις αλλαγές επιδέσμων.

Ενδείξεις

• τραυμάτων καλοήγητων

- βαθιών τραυμάτων
- μολυσμένων τραυμάτων
- εξοχροποιημένων τραυμάτων
- νεκρωτικών τραυμάτων
- δύσασμων τραυμάτων
- χειρουργικών τραυμάτων

- Επιδραστικά τραύματα, όπως κοψίματα, αμυχές, εκδορές
- Επιδραστικά εγκαύματα
- γενικά πρώτες βοήθειες

Τα σοβαρά τραύματα όπως τα βαθιά τραύματα, τα τραύματα καλοήγητων, τα νεκρωτικά, τα διαβητικά, τα μολυσμένα τραύματα, τα εξοχροποιημένα, τα δύσασμα ή τα χειρουργικά τραύματα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται υπό την επίβλεψη ενδοεταγειακής ομάδας.

Οδηγίες χρήσης

- Προσπάτετε τις άκρες του τραύματος με μια κρέμα φραγμού
- Το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney™ μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επί βάση της πληγής. Αποφύγετε την άμεση επαφή μεταξύ του τραύματος και του ακροαφίου του σκελετικού.
- Το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney™ μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις καλοήπιτες βαθιών τραυμάτων ή να εφαρταστεί σε έναν κατάλληλο επίδεσμο.
- Βεβαιωθείτε ότι το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney® είναι σε επαρκή επαρκή ή τη βάση του τραύματος – περίπου 3mm πάχος (1/4 της ίντσας). Εφαρμόστε περισσότερο αν υπάρχει υγρό στο τραύμα.
- Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα κατάλληλο μη προσκολλητικό στέριο επίθεμα ή επίδεσμος για να καλύψει το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney®
- Ο επίδεσμος θα πρέπει να είναι επαρκώς απορροφητικός για να συγκρατεί τον όγκο του υγρού του τραύματος (εξήρρωμα)
- Το αντιβακτηριακό ιατρικό μέλι Medihoney™ μπορεί να μετνα πάλιν στο τραύμα για έως 7 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα του υγρού που υπάρχει. Ο επίδεσμος θα πρέπει να αλλάζεται όταν γεμίσει με υγρό του τραύματος ή αν υπάρχει διαρροή από τον καλυπτικό επίδεσμο.

Αντενδείξεις

- Μην χρησιμοποιείτε σε άτομα που έχουν παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση σε μέλι.

Παρατηρήσεις

- Το τραύμα μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο σε μέγεθος και βάθος καθώς απομακρύνεται νεκρωμένουσ ιστός. Αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνδυάζεται από μια βελτιωμένη εμφάνιση του τραύματος.

Προφυλάξεις

- Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε αντίδραση διαφορετικά από μια σύντομη αίσθηση πονούσματος, αφαιρέστε τον επίδεσμο και πλύνετε την πάχουσα περιοχή.

- Να χρησιμοποιούνται με προσοχή και στενή παρακολούθηση σε τραύματα με πολύ εξίδρωμα.
- Δε συσάφεται για χρήση σε ουμιακές καλοήπιτες.
- Στην περίπτωση αρκής αντιστοίκασης ή μη ανταπόκρισης του τραύματος, παρακολουμέμη ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για χρήση από ένα και μόνο ασθενή

Το προϊόν είναι στείρο μόνο έως ότου σπάσει η σφράγιση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το σκελετήριο έχει υποστεί ζημία.

Επιβάλλεται η χρήση σε διάστημα 4 μηνών μετά το άνοιγμα.

