

OKUZELL[®] classic



Augentropfen 0,5% konserviert (5,0 mg Hypromellose)

Beschreibung

Okuzell Augentropfen sind ein steriler, viskoelastischer, klarer Schutzfilm für die Hornhaut. Das Produkt besteht ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen. Okuzell Augentropfen schützen und befeuchten die Augenoberfläche und machen sie gleitfähig. Dadurch bewirken sie eine lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit mechanischer Beanspruchung, z. B. bei diagnostischen Eingriffen am Auge, bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlagen, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch, oder bei Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

Anwendung

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsring des Behältnisses unbeschädigt ist. Geben sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge. Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

Zusammensetzung

Hypromellose 5,0 mg, Benzalkoniumchlorid (50%ige Lösung) 0,2mg, Natrium chlorid, Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei, Natriummonohydrogen phosphat-Heptahydrat, Wasser.

Packungsgröße

Verkaufseinheit: Mehrfachdosis-Behältnis, 1 x 10 ml

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Sicherheitsring.
- Das Auge mit dem Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt mit der Öffnung des Behältnisses vermeiden.

Vertrieb in Österreich:

Pharmaselect Handels GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Wien, Österreich

pharmaselect.

- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf dem Etikett des Behältnisses aufgedruckt.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Kontaktlinsen. Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung von Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen müssen Sie vor der Anwendung entfernen und dürfen diese frühestens 15 min nach der Anwendung wieder einsetzen.

Die Augentropfen sind nach dem erstmaligen Öffnen des Behältnisses 4 Wochen verwendbar.

Lagerung

Nicht über + 25 °C lagern.

Chargen-Nummer und „verwendbar bis“ werden auf das Etikett des Mehrfachdosis-Behältnisses gedruckt

aseptische Herstellung

Gebrauchsanweisung beachten

25 °C (25 °C) Lagerungstemperatur



Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Sicherheitsring.



Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln, Deutschland

CE 0483

OKZAT102-03-1611