

# Strataderm®

Silikongel zur professionellen  
Narbenbehandlung



**Macht wulstige Narben weicher und flacher**



**Mindert Rötungen und Verfärbungen**



**Lindert Spannungsgefühle**



**Einfache Anwendung**

**Narben - mehr als nur  
ein kosmetisches Problem**



## Strataderm® - das besondere Silikongel zur Behandlung von Narben

Im Lauf unseres Lebens hinterlassen diverse Verletzungen oder operative Eingriffe Narben auf der Haut, die mitunter recht störend sein können.

Auch wenn die komplette Wiederherstellung des ursprünglichen Hautzustandes bei alten Narben nicht möglich ist, so gibt es mit dem neuen Silikongel **Strataderm®** doch die Möglichkeit, das optische Erscheinungsbild einer Narbe deutlich zu verbessern.

**Strataderm®** stellt ein modernes Behandlungskonzept dar. Durch konsequente Anwendung kann das Erscheinungsbild von alten Narben verbessert werden. Bei neuen, bereits geschlossenen Narben wird der Bildung von abnormen Narben vorgebeugt.

**Strataderm®** ist ein Medizinprodukt. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.



## Strataderm® - Silikongel zur professionellen Narbenbehandlung

**Strataderm®** ist ein transparentes und elastisches Silikongel zur äußerlichen Anwendung. Das flüssige Silikongel aus der Tube trocknet schnell und klebt nicht.

Durch die spezielle Beschaffenheit bildet **Strataderm®** bereits nach wenigen Minuten einen dünnen Film auf der Haut. Unter dem Film wird das Feuchtigkeitsgleichgewicht des Gewebes reguliert und damit die Kollagenneubildung für eine weniger auffällige Narbe ermöglicht. Gleichzeitig bietet **Strataderm®** auch Schutz vor chemischen oder mikrobiologischen Verunreinigungen.

### Typische Anwendungsbeispiele\*:

- Aknenarben
- Kaiserschnittnarben
- Narben aufgrund operativer Eingriffe
- Narben durch Verbrennungen und Verletzungen

\* nach abgeschlossener Wundheilung

**Strataderm®** wurde speziell für die Behandlung abnormer Narben entwickelt. Es ist für alle Arten von Narben geeignet und kann alleine oder in Kombination mit anderen Behandlungen wie z.B. Druckverbänden verwendet werden. **Strataderm®** kann auf behaarter und sensibler Haut ebenso wie auf Kinderhaut aufgetragen werden.

Beginnen Sie mit der Anwendung nach Abschluss der Wundheilung. Die Narben müssen geschlossen und trocken sein. Nicht auf offene Wunden oder Verbrennungen dritten Grades auftragen.

Quellenangaben:

1. Tobola J., Dermat Estetyczna 2004;35(6):323-328
2. Moonstre S. et al., JPRAS 2014;1-9

## Tipps, um eine abnorme Narbenbildung möglichst gering zu halten:

- **Exposition** - Narben, vor allem frische Narben, sollten keinem direkten UV-Licht oder extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie Sauna- und Solariumbesuche.
- **Chemikalien** - Narben können auf bestimmte chemische Inhaltsstoffe von Waschmitteln oder Parfums empfindlich reagieren.
- **Bekleidung** - Tragen Sie keine zu enge Kleidung, um Irritationen oder weiteren Verletzungen vorzubeugen.
- **Aktivitäten** - Achten Sie darauf, dass Sie keine Bewegungen oder sportliche Aktivitäten ausüben, die Spannungen auf die Narbe erzeugen.



## Welche Packungsgröße ist für Ihre Narbe die richtige?

Packungsgröße: Größe der Narbe, die mit einer Tube **Strataderm**® 1-2x täglich über einen Zeitraum von 90 Tagen behandelt werden kann:

Packung	Narbengröße	AVP*
5 g	Lineare Narbe mit ca. 2-3 cm Länge	€ 16,50
10 g	Lineare Narbe mit ca. 5-7 cm Länge	€ 30,90
20 g	Lineare Narbe mit ca. 10-14 cm Länge	€ 50,80
50 g	Großflächige Narbe mit einer Größe von ca. 6x12 cm	€ 101,90

\* unverbindlich empfohlener Apothekenverkaufspreis  
Erhältlich bei ausgesuchten Ärzten und in Ihrer Apotheke.

## Wie wird Strataderm® angewendet?

1



Die Narbe muss geschlossen, sauber und trocken sein.

2



Eine sehr dünne Schicht auf der Haut verteilen.  
Trocknungszeit: 3-4 Minuten

3



Sollten Sie zuviel verwendet haben, das überschüssige Gel vorsichtig entfernen.

4



Sobald das Gel getrocknet ist, kann Make-up oder Sonnenschutz aufgetragen werden.

**Strataderm®** sollte mindestens 60 bis 90 Tage angewendet werden. Je größer und/oder älter die Narbe ist, desto länger dauert die Anwendung. Im Allgemeinen wird die Anwendung solange empfohlen, bis keine weitere Verbesserung der Narbe zu erkennen ist.

**Strataderm®** muss nur 1x täglich aufgetragen werden. Liegt die Narbe an einer besonders beanspruchten Stelle, empfiehlt es sich, **Strataderm®** 2x täglich aufzutragen.

**Strataderm®** sollte durchgehend (7 Tage/24 Stunden) auf die Narbe einwirken können, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

# Strataderm®

Silikongel zur professionellen  
Narbenbehandlung

- Einfache Anwendung, in der Regel nur 1x täglich
- Für sensible Haut und Kinder geeignet
- Lindert Jucken und Spannungsgefühl<sup>1</sup>
- Mindert Rötung bzw. Verfärbung der Narbe<sup>1</sup>
- Beugt abnormer Narbenbildung vor<sup>2</sup>



CE

Medizinprodukt,  
FDA-gelistet/  
TGA-zugelassen

Hersteller:  
Stratapharma AG  
Centralbahnplatz 8  
CH-4051 Basel, Schweiz  
[www.stratapharma.ch](http://www.stratapharma.ch)

Vertrieb in Österreich:  
Pelpharma Handels GmbH  
Wohndorfweg 36  
A-3001 Tulbingerkogel  
[www.pelpharma.at](http://www.pelpharma.at)

 Stratapharma

 **PELPHARMA**  
Ein österreichisches Pharmaunternehmen