

# OKUZELL



## lipid

### Liposomaler Augenspray mit 0,1 % Hyaluronsäure

Das Produkt bleibt nach der ersten Benutzung steril.

#### Wirksame Bestandteile

- Phospholipidkomplex
  - Natriumhyaluronat
- Isotonische boratgepufferte Lösung auf pH-Wert 7,2.

#### Form und Inhalt

Augenlösung 15 ml Sprühflasche  
unkonserviert

#### Indikation

Spray zum Aufsprühen auf das geschlossene Auge. Zur Befeuchtung, Linderung und Pflege trockener Augen. Auch für Kontaktlinsträger empfohlen.  
Hyaluronsäure ist ein natürliches Gleitmittel, welches Augenreizungen – ausgelöst durch mangelnden Tränenfluss oder durch zu lange Tragezeiten von Kontaktlinsen – verhindern und mildern kann.

#### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Der Augenspray ist so konzipiert, dass er die Augenoberfläche langsam von außen erreicht. Halten Sie das Augenlid geschlossen und platzieren Sie den Spray ca. 10 cm vom Auge entfernt. Bitte nicht direkt in das Auge sprühen! Bei der ersten Anwendung nach dem Öffnen ein paar Mal pumpen, um die Düse aufzufüllen. Sprühen Sie ein- oder zweimal auf jedes Augenlid. Wiederholen Sie die Anwendung nach Bedarf mehrmals täglich.

#### Nebenwirkungen

Bei gebrauchsmäßiger Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### Überdosierung

Es wurden keine Fälle von Überdosierung bestätigt.

#### Haltbarkeit und Aufbewahrung

Benutzen Sie das Produkt nur bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf der Flasche neben dem Symbol mit der Sanduhr. Bitte kühl und trocken aufbewahren. Keiner Wärme oder direktem Sonnenlicht aussetzen.

#### Achtung

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Keiner Wärme oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Nicht einnehmen.
- Nicht direkt in das Auge sprühen.
- Nicht mit wasserlöslichem Make-up anwenden – die Liposome können Bestandteile des Make-Ups in das Auge transportieren.
- Nicht anwenden nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

#### Medizinprodukt

#### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pharmaselect Handels GmbH,  
Ernst-Melchior-Gasse 20,  
A-1020 Wien, Tel: 01-78603860  
Email: [info@pharmaselect.com](mailto:info@pharmaselect.com)  
[www.pharmaselect.at](http://www.pharmaselect.at)



innomedis AG  
Walther-Rathenau-Str. 5  
D-50996 Köln

Vertrieb  
Pharmaselect Handels GmbH  
Wien, Österreich



5°C / 30°C

STERILE A



0481

Stand: 03.2018  
OKSAT102-03-1812

REV.0:10012:12:03.2018