



Gebrauchsanweisung beachten

Thealoz Duo

**Befeuchtung, Benetzung
und Schutz trockener Augen.
Zur Behandlung moderater bis
schwerer Symptome trockener
Augen**

ABAK®-Flasche - Ohne
Konservierungsmittel.

ZUSAMMENSETZUNG:

Trehalose 3 g
Natriumhyaluronat..... 0,15g
Natriumchlorid, Trometamol, HCl,
Wasser für Injektionszwecke.....
..... q.s. ad. 100 ml

NAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS:

Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand -
Cedex 2
FRANKREICH

WANN SOLLTE THEALOZ DUO ANGEWENDET WERDEN:

THEALOZ DUO enthält eine Lösung zur Anwendung am Auge oder auf Kontaktlinsen. THEALOZ DUO wird empfohlen zur Behandlung der Symptome trockener Augen (Beschwerdegefühl, Stechen, Brennen) aufgrund äußerer Einflüsse wie Wind, Rauch, Staub, Luftverschmutzung, starker Sonneneinstrahlung, Kälte, trockener Hitze, Klimaanlage sowie Flugreisen oder langer Bildschirmarbeit.

THEALOZ DUO enthält keine Konservierungsmittel und bietet optimalen Schutz für das Augengewebe. Es ist für alle Arten von Kontaktlinsen geeignet und sorgt für sofortigen Tragekomfort während des Tages.

EIGENSCHAFTEN:

THEALOZ DUO ist eine sterile, hypotone und ph-neutrale Lösung ohne Konservierungsmittel. Hauptbestandteile sind Trehalose, eine natürliche Substanz, die in zahlreichen Pflanzen- und Tierarten vorkommt, und Hyaluronsäure (Natriumhyaluronat), eine im Auge vorkommende, natürliche Substanz.

Dank seiner physikalisch-chemischen Merkmale verfügt Trehalose über sehr gute antioxidative, feuchtigkeitsspendende und schützende Eigenschaften. Trehalose ist ein wesentliches Element der anhydrobiotischen Mechanismen, die in verschiedenen Mikroorganismen beobachtet werden (ein verlangsamter Stoffwechsel ermöglicht es ihnen, auch extreme Trockenheit zu überleben).

Trehalose wirkt antioxidativ und schützt und stabilisiert die Zellmembranen, indem es die Veränderung von Proteinen und die Zerstörung von Lipiden verhindert.

Hyaluronsäure ist ein im menschlichen Körper (Auge) natürlich vorkommender Mehrfachzucker mit außergewöhnlichen feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften, die für eine gleichmäßige und lang anhaltende Befeuchtung der Hornhautoberfläche sorgen. Die bioadhäsiven Eigenschaften bewirken eine gute Haftung auf der Augenoberfläche, eine lang anhaltende Linderung der Symptome trockener Augen und eine rasche Regeneration des geschädigten Hornhautgewebes.

Durch die Kombination von Trehalose und Hyaluronsäure bewirkt THEALOZ DUO eine lang anhaltende, intensive Befeuchtung

der Augen, effektiven Schutz der Augenoberfläche und maximalen Komfort.

THEALOZ DUO steht in einer Mehrdosis-ABAK[®]-Flasche zur Verfügung, enthält keine Konservierungsmittel und vermeidet dadurch mögliche Schädigungen der Augen durch Konservierungsmittel. Das innovative, patentierte ABAK[®]-System ermöglicht die Anwendung der Augentropfen aus einer herkömmlichen Tropfflasche und verhindert durch ein 0,2 µm Filtermembran-System eine bakterielle Verunreinigung der Lösung. Die so geschützte Lösung kann nach dem Öffnen der Flasche 3 Monate verwendet werden.

BESONDERE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG:

- nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind
- vermeiden Sie jeden Kontakt zwischen der Tropferspitze und dem Auge oder Augenlid
- die Augentropfen nicht injizieren oder einnehmen
- verwenden Sie die Flasche nicht, wenn das Schutzsiegel am Verschluss vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH
AUFBEWAHREN.

WECHSELWIRKUNGEN:

Wenn Sie zusätzlich andere Augentropfen verwenden, sollten Sie zwischen den Anwendungen mindestens 10 Minuten vergehen lassen.

WIE IST DAS PRODUKT ANZUWENDEN:

ANWENDUNGSHINWEISE:

ZUM EINTROPFEN IN DAS AUGE

- Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt zwischen der Tropferspitze und dem Auge oder Augenlid, insbesondere, wenn Sie an einer Augeninfektion leiden.
- Bringen Sie einen Tropfen in den Bindehautsack ein, indem Sie das untere Augenlid leicht nach unten ziehen und dabei nach oben blicken.
- Verschließen Sie die Flasche nach jeder Anwendung.

DOSIERUNG:

1 Tropfen in jedes Auge, 4 – 6 Mal täglich.

THEALOZ DUO kann während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN:

In seltenen Fällen können leichte Augenreizungen auftreten.

AUFBEWAHRUNG:

Nach dem Öffnen der Flasche nicht länger als 3 Monate anwenden.

Nicht über 25°C aufbewahren.

NACH ABLAUF DES AUF DER VERPACKUNG AUFGEDRUCKTEN VERFALLDATUMS NICHT MEHR ANWENDEN.

Das angegebene Verfalldatum gilt für ein unbeschädigtes, ordnungsgemäß gelagertes Produkt. Beschädigte Flaschen nicht verwenden.

STAND DER INFORMATION: 02/2013

STERILE A



CE 0459

 Théa

NZ762C10L02/1017