

Cationorm[®]

MD sine

Augentropfen, Emulsion

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produkts beginnen.

Heben Sie die Packungsbeilage auf.

Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Ihre Beschwerden anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

1. Was ist Cationorm[®] MD sine und wofür wird es angewendet?

Cationorm[®] MD sine ist eine sterile hypotonische unkonservierte

Augentropfen-Emulsion in Form einer milchigen Lösung.

Cationorm[®] MD sine enthält: Paraffinöl, Glycerol, Tyloxapol, Poloxamer 188, Tris-Hydrochlorid, Tromethamin, Cetalkoniumchlorid (als kationische Substanz) und gereinigtes Wasser. Jede Flasche Cationorm[®] MD sine enthält 10 ml sterile Emulsion.

Cationorm[®] MD sine unterstützt alle drei Schichten des Tränenfilms und trägt somit zu einer langanhaltenden Benetzung und Befeuchtung der Augenoberfläche sowie zum Schutz des Tränenfilms vor übermäßiger Verdunstung bei. **Cationorm[®] MD sine wird empfohlen zur Linderung von Symptomen trockener Augen, wie Stechen, Jucken oder Augenbrennen bzw. von Fremdkörpergefühl (Sandkorn- oder Staubgefühl) in den Augen.**

Diese Symptome können durch äußere Faktoren verursacht werden wie z.B.

Klimaanlagen, Wind, Luftverschmutzung, Rauch, Staub, Flugreisen, Bildschirmarbeit, Tragen von Kontaktlinsen, refraktive Hornhautchirurgie (Sehkorrektur durch Augenlaserbehandlung) oder auch durch eine Fehlfunktion der Meibomdrüsen (Lipidmangel bzw. falsche Lipidzusammensetzung im Tränenfilm) bedingt sein.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cationorm[®] MD sine beachten ?

Cationorm[®] MD sine darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile des Produkts sind.

Dieses Produkt eignet sich nicht zur Behandlung anderer Augenerkrankungen. **Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Fragen haben.**

Falls Sie derzeit noch weitere Augentropfen anwenden, sollten Sie danach mindestens fünf Minuten warten, bevor Sie Cationorm[®] MD sine anwenden, damit der vorherige Tropfen nicht ausgewaschen wird. Es wird empfohlen, Cationorm[®] MD sine zuletzt zu tropfen.

Cationorm[®] MD sine beeinträchtigt nicht die Qualität von Kontaktlinsen und kann während des Tragens von harten und weichen Kontaktlinsen angewendet werden.

3. Wie ist Cationorm[®] MD sine anzuwenden ?

ANWENDUNG AM AUGE

Die empfohlene Dosis ist 1 Tropfen in jedes Auge 1- bis 4-mal täglich.

Anwendungsanleitung:



- Waschen Sie sich die Hände.

- Wenn Sie diese Flasche Augentropfen zum ersten Mal anwenden, entfernen Sie den Sicherungsring der Verschlusskappe durch Ziehen an der Lasche.

- Öffnen Sie die Flasche, indem Sie vorsichtig an der Verschlusskappe ziehen.



- Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und Mittelfinger.

- Vermeiden Sie eine Berührung der Tropferspitze mit den Fingern.

- Beugen Sie den Kopf zurück.

- Ziehen Sie das untere Augenlid sanft nach unten und schauen Sie dabei nach oben.



- Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze nach unten über das Auge und legen Sie den Handrücken auf die Stirn. Drücken Sie vorsichtig und gleichmäßig auf die Flasche. Beachten Sie, dass der Tropfen erst nach einer kurzen Verzögerung aus der Flasche kommt.

- Lassen Sie einen Tropfen in das Auge fallen und blinzeln Sie mehrmals.



- Berühren Sie dabei weder Augen noch Wimpern mit der Tropferspitze.

- Stecken Sie nach jedem Gebrauch die Verschlusskappe wieder fest auf die Flasche.

- Bewahren Sie die Flasche im Umkarton auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Verwenden Sie Cationorm[®] MD sine nicht länger als drei Monate nach dem ersten Öffnen.



Wenn Sie Cationorm[®] MD sine länger als drei Monate nach dem ersten Öffnen verwenden, besteht ein Infektionsrisiko, da die Augentropfen durch äußere Einflüsse verunreinigt werden könnten.

4. Was sind mögliche Nebenwirkungen?

In sehr seltenen Fällen können vorübergehende Beschwerden wie eine Reizung des Auges, Augenschmerzen, Fremdkörpergefühl im Auge, Rötung des Auges, Jucken des Auges, wässrige Augen, brennendes Gefühl im Auge, vorübergehendes verschwommenes Sehen, Entzündung der Augenlider oder Schwellung der Augenlider auftreten. Diese Symptome sind auch Teil der typischen Krankheitszeichen bei trockenen Augen. Sie sind verbunden mit der zugrundeliegenden Vorerkrankung eines Patienten, der an Trockenem Auge leidet. WENN SIE NEBENWIRKUNGEN BEMERKEN, DIE NICHT IN DER PACKUNGSBEILAGE ANGEGEBEN SIND, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ARZT ODER APOTHEKER.

5. Wie ist Cationorm® MD sine aufzubewahren?

Bewahren Sie die Flasche im Umkarton bei Raumtemperatur auf.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nicht anwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.
Nicht nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett aufgedruckten Verfalldatum verwenden.
Vermerken Sie das Datum des Anbruchs der Flasche:
Cationorm® ist auch in Einzeldosisbehältnissen (SD) erhältlich:
Cationorm® SD sine 30 x 0,4 ml

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2015

Vertrieb in Österreich:
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
FINNLAND

Hersteller:
 Santen SAS
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment Genavenir IV
91000 Evry
FRANKREICH

CE 0459
2011

STERILE A



ESSENTRA

Page 2/2

Cationorm

Autriche

Désignation

NOT20329V01

N° d'article

150 x 350

Format ouvert

150 x 24 mm

Format fermé

Gris 431

Couleurs recto

Gris 431

Couleurs verso

50 grammes

Grammage

322

N° code barre

PH01

N° de spécification Essentra

SPEG 33

N° de spécification Pharmaster

18/04/2018

Date