

## Produktinformation

Produktbezeichnung	<b>snoreeze Nasenstrips Large</b>
Marke	snoreeze
Inhalt	10 Stück
Rechtlicher Status	Medizinprodukt
PZN A	4840926
PZN D	-
Anwendungsgebiet:	Zur Schnarchlinderung
Kurztext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegen Schnarchen bei Erkältung, Allergien oder verstopfter Nase.</li> <li>• Hypoallergen</li> <li>• Latexfrei</li> </ul>
Verzehrsempfehlung Dosierung	<p>Die Anwendung von snoreeze Nasenstrips ist einfach.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waschen Sie die Nase.</li> <li>2. Trocknen Sie die Nase ab</li> <li>3. Positionieren Sie den Nasenstrip auf den Nasenflügeln .</li> <li>4. Drücken Sie den Strip an den Nasenflügeln leicht, etwa 10 Sekunden lang, an.</li> </ol> <p>Nicht länger als 12 Stunden pro Tag anwenden.</p>
Langtext	<p><b>Wie wirken snoreeze Nasenstrips?</b>            Snoreeze Nasenstrips helfen gegen Schnarchen bei Erkältung, Allergien oder verstopfter Nase. Die beweglichen Strips öffnen sanft die Nase und verbessern die Luftzufuhr für eine effektive Schnarchlinderung</p>
Wichtige Hinweise	<p>Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf wunder, oder gereizter Haut, oder bei Sonnenbrand anwenden. Falls eine Hautreizung auftritt, die Anwendung beenden. Nicht länger als 12 Stunden pro Tag anwenden und den Strip langsam entfernen. Außerhalb de Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.</p> <p>Lagerung zwischen 5 und 25°C.</p> <p>Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation,</p>

	Arzt oder Apotheker. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
Weitere Informationen unter	<a href="http://www.snoreeze.de">www.snoreeze.de</a>
Inverkehrbringer	guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG Eduard-Bodem-Gasse 6 A-6020 Innsbruck <a href="mailto:doc@guterrat.net">doc@guterrat.net</a>
Stand der Information	15.05.2020