



# FUTURO™ KNIE-BANDAGE MIT SEITLICHER GELENKSCHIENE

48579DABI

 HOHER  
STÜTZGRAD



**Beidseitig tragbare laterale Stabilisatoren für optimale Unterstützung nach einer Verletzung.**

### IDEAL FÜR:

Unterstützung bei den am häufigsten auftretenden Verletzungen wie Verstauchungen und Zerrungen

### EIGENSCHAFTEN:

- 1 Befestigungsriemen bieten anpassbare Unterstützung und passgenauen Sitz.
- 2 Polsterung der Kniescheibe für Stabilität und Schutz.
- 3 Strapazierfähiges Neoprenmaterial sorgt für starken Halt, schmerzlindernde Wärme und Komfort.
- 4 Glatte Kanten und größere Länge für mehr Tragekomfort.

### GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
48579DABI	5233329	40.6-55.9



Verwendungszweck: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Knien.

**ACHTUNG: Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren oder Neopren-Gummimischungen. Falls Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.**

Zusammensetzung: Aluminium, Neoprene, Nylon, Polypropylene, POM, EVA.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

### TRAGEANWEISUNG:



Vorderseite

Lösen Sie die Bänder vorn und öffnen Sie die Bänder hinten sowie die Verschlüsse. Legen Sie die Bandage mit dem breiten Ende zum Oberschenkel und dem Patellaring über der Kniescheibe auf. Schließen Sie die Bandage an der Rückseite zuerst unten, dann oben.




Rückseite

Führen Sie die Gurtbänder zur zusätzlichen Stabilisierung durch die Schnallen. Stellen Sie alle Schließen so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.



Rückseite

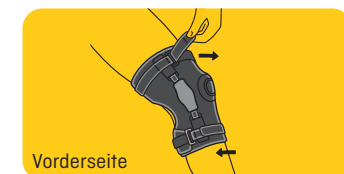

Vorderseite

Achten Sie beim Spannen der Gurtbänder darauf, dass die Verschlüsse jeweils seitlich in der Mittellinie des Beins bleiben.

3M Österreich GmbH,  
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J  
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien  
www.futuro.de

