

# Protefix<sup>®</sup>

## Haft-Creme

### Neutral

für Voll- und Teilprothesen

#### Protefix Haft-Creme Extra-Stark Neutral

- 1. Neutral:** ohne Farb- und Geschmacksstoffe, daher für Allergiker geeignet, homöopathieverträglich, keine Aromaveränderung von Speisen und Getränken
- 2. Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 3. Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung
- 4. Schutz:** hilft das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern, Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort

**Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.**  
Für Voll- und Teilprothesen geeignet.

**Anwendung:** Prothese reinigen und **Protefix** Haft-Creme Extra-Stark **Neutral** in Abständen auf die nasse Prothese auftragen. Die Prothese einsetzen und einige Sekunden fest andrücken. Nach Gebrauch bitte die Tube sorgfältig verschließen; die Öffnung dabei sauber und trocken halten.

**Zusammensetzung:** **Protefix** Haft-Creme Extra-Stark **Neutral** enthält: Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica.

**Bitte Gebrauchsanweisung beachten.**



  
**Quaisser**  
PHARMA

GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg