

Gebrauchsanweisung

COLDAMARIS

Allergie

Nasenspray

Was ist COLDAMARIS Allergie Nasenspray?

COLDAMARIS Allergie Nasenspray ist eine hypotone, viskose, konservierungsmittelfreie Lösung zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut und symptomatischen Behandlung von Begleiterscheinungen bei allergischer Rhinitis (allergischem Schnupfen).

Was enthält COLDAMARIS Allergie Nasenspray?

COLDAMARIS Allergie Nasenspray enthält 1,2 mg Iota-Carrageen (Carragelose®). Carragelose® ist eine Substanz, die aus Rotalgen aus dem Meer gewonnen wird. Die sonstigen Bestandteile sind Natriumchlorid (0,5 %), Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure und gereinigtes Wasser.

Durch das spezielle Sprühsystem mit Filter kann auf ein Konservierungsmittel verzichtet werden.

Welche Funktion hat COLDAMARIS Allergie Nasenspray?

Mit der Atemluft dringen viele Teilchen wie auch Pollen und andere Allergene in die Nase ein. Die Nasenschleimhaut kann ihre natürliche Reinigungs- und Schutzfunktion als Barriere gegen äußere Einflüsse wie Staub, Rauch oder Pollen nur bei ausreichender Feuchtigkeit erfüllen.

COLDAMARIS Allergie Nasenspray bildet einen feuchtigkeitsspendenden Schutzfilm, der durch die viskositätserhöhenden Eigenschaften der Carragelose® länger auf der Nasenschleimhaut verbleibt. Dieser Film wirkt als Barriere gegen äußere Einflüsse. Darüber hinaus unterstützt die regelmäßige, anhaltende Befeuchtung die natürliche Funktion der Schleimhaut und erleichtert die Nasenreinigung bei erhöhter Belastung durch Staub, Rauch oder Pollen.

Wann sollen Sie COLDAMARIS Allergie Nasenspray anwenden?

- Zur symptomatischen Behandlung von Beschwerden, die infolge trockener oder gereizter Nasenschleimhaut bestehen,
- insbesondere zur symptomatischen Behandlung von Begleiterscheinungen bei allergischer Rhinitis (allergischem Schnupfen) wie Trockenheit in der Nase, rinnende oder verstopfte Nase, Juckreiz und Niesreiz.

COLDAMARIS Allergie Nasenspray ist geeignet zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr und bei Erwachsenen. Die Anwendung bei Säuglingen unter 1 Jahr soll nur auf Anweisung eines Arztes erfolgen.

Es liegen keine Hinweise vor, die gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Wie und wie oft sollen Sie COLDAMARIS Allergie Nasenspray anwenden?

Entfernen Sie vor der Anwendung die Schutzkappe und führen Sie bei Bedarf einige Pumpvorgänge durch, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Nun ist COLDAMARIS Allergie Nasenspray anwendungsbereit.





Halten Sie die Flasche beim Sprühen möglichst aufrecht. Das Ansaugrohr muss in die Flüssigkeit ragen. Führen Sie den Sprühkopf vorsichtig und nicht zu tief ein, um Verletzungen zu vermeiden. Sprühen Sie mehrmals täglich, je nach individuellem Bedarf, einen Sprühstoß in jedes Nasenloch ein.

Die Anwendung kann beliebig oft erfolgen und über einen längeren Zeitraum ohne Anwendungspausen fortgesetzt werden. Es besteht keine Gefahr von Gewöhnungseffekten.

Falls die Funktionstüchtigkeit des Sprühkopfes beeinträchtigt ist, drücken Sie den Sprühkopf mehrmals in senkrechter Stellung, bis der Sprühnebel wieder austritt.

Spülen Sie nach der Anwendung den Sprühkopf mit Wasser ab, trocknen Sie ihn mit einem sauberen Tuch und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf den Sprühkopf.

Wann sollen Sie COLDAMARIS Allergie Nasenspray nicht anwenden?

Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen Bestandteil des Präparates sind.

Mögliche Nebenwirkungen/Wechselwirkungen

Es sind bislang keine Nebenwirkungen bekannt.

Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Produkten wurden nicht durchgeführt.

Hinweise zur sicheren Anwendung

Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn Ihre Beschwerden nicht besser werden oder Schmerzen auftreten.



COLDAMARIS Allergie Nasenspray wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und steril mit einem speziellen Applikationssystem abgefüllt. Bei Manipulationen am Behältnis oder Applikationssystem darf COLDAMARIS Allergie Nasenspray nicht mehr verwendet werden, da eine sichere Anwendung nicht mehr gewährleistet ist.

Aus hygienischen Gründen und um eine Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden, sollte eine Sprühflasche jeweils nur von ein und derselben Person benützt werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße: Flasche mit 20 ml Lösung, mit Sprühaufsatz. 1 Sprühstoß = 0,14 ml.

Haltbarkeit: COLDAMARIS Allergie Nasenspray kann bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendet werden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Lagerungshinweise:  Nicht über 25 °C lagern.  Lichtschutz erforderlich.

Hinweise zur Entsorgung: Keine besonderen Anforderungen.

Weitere wichtige Informationen

Die auf der Verpackung angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Hersteller

 Verwendbar bis

 Chargenbezeichnung

 Nicht über 25 °C lagern

 Lichtschutz erforderlich

 Gebrauchsanweisung beachten!

Hersteller:

MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT



Vertrieb:

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT

Stand der Information: Mai 2021

