

Gebrauchsanweisung



zur täglichen Nasen-, Augen- und Ohrenhygiene



zur Wundreinigung



zur Inhalation bei einer Aerosoltherapie

Was ist COLDAMARIS MONODOSE?

COLDAMARIS MONODOSE ist eine sterile, isotone Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel in Einzeldosisfläschchen für die Nasen-, Augen- und Ohrenhygiene sowie zur Wundreinigung und Inhalation.

Zusammensetzung - was enthält COLDAMARIS MONODOSE?

COLDAMARIS MONODOSE enthält 0,9% (9 mg/ml) Natriumchlorid und gereinigtes Wasser. Ohne Konservierungsmittel.

Wann sollen Sie COLDAMARIS MONODOSE anwenden?

- Zur Nasenhygiene: zum Einträufeln oder Reinigen (Ausspülen) bei trockener oder verstopfter Nase
- Zur Augenhygiene: zum Einträufeln, Reinigen oder Baden
- Zur Ohrenhygiene
- Zur Wundreinigung
- Zur Inhalation bei einer Aerosoltherapie

COLDAMARIS MONODOSE ist geeignet zur Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen.

Wie und wie oft sollen Sie COLDAMARIS MONODOSE anwenden?

Waschen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig Ihre Hände.

Trennen Sie ein Einzeldosisfläschchen ab und drehen Sie zum Öffnen die Kappe ab. Nun ist COLDAMARIS MONODOSE anwendungsbereit.

Verwenden Sie den Inhalt des Fläschchens nicht, wenn dieses bereits beschädigt ist, da die Sterilität der Lösung möglicherweise nicht mehr gegeben ist!

Ein Einzeldosisfläschchen ist für den Einmalgebrauch bestimmt und muss unmittelbar nach dem Öffnen verwendet werden. Ein Fläschchen darf nur für eine Person und nur für eine Art der Anwendung verwendet werden.

• Nasen- und Augenhygiene:

Für die Nasen- und Augenhygiene kann das Produkt täglich, je nach Bedarf für 1 bis 6 Anwendung(en) pro Tag verwendet werden.

Anwendung in der Nase:

Zum Einträufeln oder Spülen bei trockener oder verstopfter Nase.

Neigen Sie den Kopf zur Seite, führen Sie die Spitze des Fläschchens vorsichtig in das Nasenloch ein und drücken Sie leicht auf das Fläschchen. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Nasenloch. Bringen Sie den Kopf wieder in eine aufrechte Position, damit das Sekret abfließen kann, und wischen Sie überschüssige Flüssigkeit ab. Schnäuzen Sie sich 10 Minuten nach der Anwendung nicht kräftig.

Wenn Sie das Produkt bei Kindern anwenden, träufeln Sie die Lösung mit möglichst wenig Druck ein, um jedes Risiko einer Kontamination des Mittelohrs zu vermeiden. ____

Anwendung am Auge:

Zum Einträufeln, Reinigen oder Baden.

Geben Sie ein paar Tropfen der Lösung in jedes Auge. Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit mit einem sterilen Tuch ab. Das Einzeldosisfläschchen darf nicht mit der Augenoberfläche in Kontakt kommen. Wenn Sie ein anderes Augenprodukt verwenden, beginnen Sie mit der Anwendung von COLDAMARIS MONODOSE und warten Sie 15-Minuten, bevor Sie das andere Produkt anwenden. ____

Die Lösung ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet.



• **Ohrenhygiene:**

Zur Spülung.

Für eine angemessene Ohrenhygiene verwenden Sie **COLDAMARIS MONODOSE** nach der Anwendung eines oberflächenaktiven Mittels, um das gelöste Ohrenschmalz abzuheben und auszuspülen. Ein Einzeldosisfläschchen kann für beide Ohren verwendet werden. Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch ab.

• **Wundreinigung:**

Zur Spülung.

Spülen Sie die Wunde mit dem gesamten Inhalt eines Einzeldosisfläschchens. Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit nur von der gesunden Haut ab. Vermeiden Sie den Kontakt des Fläschchens mit der Wunde.

• **Inhalation:**

Wenn **COLDAMARIS MONODOSE** als Lösungsmittel zur Inhalation bei Aerosoltherapie eingesetzt wird, beachten Sie die Hinweise auf dem zu inhalierenden Produkt.

Wenn die Lösung unverdünnt zur Inhalation bei Aerosoltherapie verwendet wird, beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Aerosoltherapiegeräts.

Bei erstmaliger Anwendung oder bei Überempfindlichkeit der Atemwege, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch

- Verwendung nur durch eine Person! Zum einmaligen Gebrauch!
- Verwenden Sie die Lösung unmittelbar nach dem Öffnen und entsorgen Sie das Einzeldosisfläschchen nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie dasselbe Einzeldosisfläschchen nicht für verschiedene Anwendungen.
- **Nicht zur Injektion!**
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn das Einzeldosisfläschchen beschädigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Fläschchens mit dem Auge oder Wunden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Geöffnete Einzeldosisfläschchen dürfen nicht wiederverwendet werden: da das Produkt kein Konservierungsmittel enthält, besteht bei Wiederverwendung das Risiko, eine kontaminierte Lösung anzuwenden.

COLDAMARIS MONODOSE ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa.

Packungsgröße

Packung mit 30 Einzeldosisfläschchen zu 5 ml

COLDAMARIS MONODOSE kann bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwendet werden.

Geöffnete Einzeldosisfläschchen dürfen nicht wiederverwendet werden!

Die auf der Verpackung angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:



Hersteller



Chargenbezeichnung



Gebrauchsanweisung beachten!



Vertrieb



Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Verwendbar bis



Nicht zur Wiederverwendung!

Hersteller

Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez,
Espace Industriel Nord CS 28028,
80084 Amiens Cedex 2 – FR
Hergestellt in Frankreich.

Vertrieb

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT

Datum der CE-Kennzeichnung

16/09/2016

Stand der Information

September 2017



0459

