

BE Ear Pro * Sprühflasche *
20ml / Net 0.68 Fl.Oz Flüssigkeit

Packungsbeilage * Informationen für den Anwender

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie Ear Pro Ohrenspray anwenden. Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Möglicherweise möchten Sie diese später erneut lesen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Bitte informieren Sie uns unter info@earpro.co

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Ear Pro und wofür wird es angewendet?
2. Zusammensetzung
3. Vorsichtsmaßnahmen: Was müssen Sie vor der Anwendung von Ear Pro beachten?
4. Hinweise: Wie ist Ear Pro anzuwenden?
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie ist Ear Pro aufzubewahren?

1. WAS IST Ear Pro UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

• Ear Pro-Ohrenspray wird angewendet, um zu verhindern, dass Wasser im Gehörgang eingeschlossen wird.

- Ear Pro ist geeignet für Kinder und Erwachsene jeden Alters.
- Eingeschlossenes Wasser im Ohr ist ein sehr häufiges Problem und kann zu folgenden Beschwerden führen: Unwohlsein, Schmerzen, Entzündungen, oder Schwimmer-Ohr.
- Ear Pro erzeugt eine wasserabweisende Beschichtung im Gehörgang und wird auf natürlichem Wege abtransportiert.
- Ear Pro wird häufig von Schwimmern, Familien, Tauchern, Surfern und Leistungssportlern verwendet.
- Ear Pro ist indiziert für die Prävention von Otitis externa bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen jeden Alters.

2. Inhaltsstoffe (INCI):

Paraffinum Liquidum, Origanum Vulgare Leaf Oil

3. WARNHINWEISE: Was müssen Sie vor der Anwendung von Ear Pro beachten?

Verwenden Sie Ear Pro nicht

[Gegenanzeigen]:

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Paraffinöl oder Oregano Öl sind.
 - wenn Sie perforierte/verletzte Trommelfelle- oder eine Ohreninfektion haben (z.B. nach Ohrenoperationen, Paukenröhrchen etc.).
 - wenn Sie anderweitige Probleme mit Ihren Ohren haben - wie Schmerzen, Schwellungen, Ausfluss.
 - Sprühen Sie nicht in Augen, Nase oder Mund Wenn Ear Pro in die Augen kommt.
 - Achten Sie darauf, dass Sie Ear Pro nicht in die Augen bekommen.
 - Wenn dies passiert, spülen Sie das Auge sofort 10 bis 15 Minuten lang mit Wasser. Halten Sie dabei die Augenlider auseinander und vermeiden Sie, dass die Spülflüssigkeit in das andere Auge gelangt.
 - Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine Reizung anhält.
- Schwangerschaft und Stillzeit**
Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder

Apotheker um Rat. Es liegen keine Erfahrungen oder Untersuchungen von der Verwendung von Ear Pro bei Schwangeren oder während der Stillzeit vor. Daher sollte das Produkt im Zweifel nicht angewendet werden.

Jede Ear Pro Flasche sollte immer nur von ein und derselben Person verwendet werden. Sprühen Sie nicht in der Nähe von offenem Feuer.

4. Hinweise: WIE IST Ear Pro ANZUWENDEN?

Verwenden Sie Ear Pro nur in den Ohren. In der Handfläche erwärmen oder gut schütteln. Richten Sie die Düse nicht auf sich selbst oder andere Personen.

- Geben Sie jeweils 1 Sprühstöße Ear Pro in jedes Ohr.
- Massieren Sie den Tragus (Außenhaut hinter dem Ohr) sanft, um sicherzustellen, dass sich Ear Pro gleichmäßig im Gehörgang verteilt.
- Wischen Sie eventuelle Reste mit einem Tuch ab
- Nach Gebrauch Hände waschen.
- Verschließen Sie Ihre Ohren nicht mit Watte.
- Verwenden Sie Ear Pro nicht, wenn Sie Medikamente für das Ohr verwenden.
- Wiederholen Sie die Anwendung nach 2 Stunden Aufenthalt im Wasser.
- Geben Sie nach Gebrauch die Flasche in den Karton zurück.

5. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, wenn das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung nur äußerlich angewendet wird. Falls das Produkt verschluckt wird können Nebenwirkungen auftreten und ein Arzt sollte aufgesucht werden.

Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

6. WIE IST Ear Pro AUFZUBEWAHREN?

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht nach dem auf der Flasche und dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Verwenden Sie das Produkt nach dem Öffnen nicht länger als 6 Monate.
- Nicht über 45°C / 113°F lagern.
- Bewahren Sie die Flasche aufrecht im Umkarton auf, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller (info@earpro.co) und Ihrer örtlichen zuständigen Behörde für Medizinprodukte.

Fragen oder Kommentare:
www.earpro.co

Hersteller:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta

Dieses Merkblatt wurde zuletzt im May 2025 V1.2 überarbeitet.

EarPro ist eine eingetragene Marke von LiquidPro Ltd.