



aktiv

# Meerwasser Nasenspülung Aloe Vera und Eukalyptus

**Doppelherz Meerwasser Nasenspülung** ist ein abschwellendes Mittel für die Nase, das bei krankhaften Prozessen mit Sekretbildung in der Nase hilft. Seine tägliche Anwendung trägt zur Reinigung, zum Schutz und zur Befeuchtung der Nasengänge bei. Die hypertonische Meerwasserlösung hat eine intensive feuchtigkeitsspendende Wirkung, die durch Aloe vera noch verstärkt wird, da Aloe vera die feuchtigkeitsspendende Kraft des Meerwassers unterstützt und verlängert und damit hilft, eine übermäßige mikrobiologische Besiedlung in den Nasengängen zu vermeiden. Zusätzlich verströmt Eukalyptus ein angenehmes und frisches Aroma.

#### Zusammensetzung:

Meerwasser (Natriumchlorid 2,2 %), gereinigtes Wasser, Propylenglykol, ethoxyliertes hydriertes Rizinusöl, Aloe vera, Eukalyptusaroma, Mischung aus natürlichen Tocopherolen, Zitronensäure und Trinatriumcitrat-Dihydrat.

#### Empfohlene Dosis:

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: 2 bis 6 Sprühstöße pro Tag in jedes Nasenloch geben oder je nach Bedarf.

#### Anwendungshinweise:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe.
2. Führen Sie den Nasenapplikator vorsichtig in ein Nasenloch ein und drücken Sie die Pumpe, um das Produkt abzugeben.
3. Lassen Sie die überschüssige Lösung ablaufen, um den Schleim zu entfernen, und schnäuzen Sie sich anschließend.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch.
5. Reinigen Sie die Spitze mit Wasser und trocknen Sie sie ab.
6. Verschließen Sie den Nasenapplikator bis zur nächsten Anwendung mit der Schutzkappe.

#### Gegenanzeigen und unerwünschte Wirkungen:

- Bei den empfohlenen therapeutischen Dosen sind keine unerwünschten Wirkungen beschrieben worden, aber wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Produkt müssen dem Hersteller, dem Vertreiber und der nationalen Gesundheitsbehörde in Ihrem Land gemeldet werden.
- Bei den angegebenen Dosen sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt. Es wird jedoch empfohlen, Ihren behandelnden Arzt um Rat zu fragen, wenn Sie irgendwelche Medikamente einnehmen.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Aus hygienischen Gründen und um die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden, sollte dieses Behältnis nicht von mehr als einer Person benutzt werden.
- Bei einer bekannten oder vermuteten Allergie gegen einen der Bestandteile dieses Medizinprodukts ist es ratsam, es nicht zu verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

#### Aufbewahrung und Verfalldatum:


- Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden, das auf der Faltschachtel und der Flasche angegeben ist.
- Das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort aufzubewahren. Das Produkt unter 40 °C lagern, geschützt vor direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen.
- Die Flasche und die Schutzkappe in den entsprechenden Behältnissen ablegen.
- Es wird empfohlen, die Faltschachtel oder die Packungsbeilage während der Anwendung des Produkts nicht zu entsorgen.

#### Darreichungsform:

Drucksprühflasche mit 120 ml Inhalt und Nasenapplikator.



MD CE 0051 REF PL0112\_120\_Medium

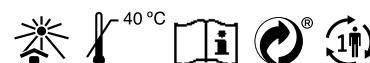

STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès  
BARCELONA - SPANIEN

#### Vertrieb und Information:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
Deutschland

Mit dem Wissen Ihrer Erfahrungen mit dem Produkt können wir wachsen.



Stand der Information: 17.07.2024, Version 03.

Mat.-Nr.: 90588992  
Hersteller-Nr.: 5019250



Q  
Queisser

PHARMA

Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
[www.doppelherz.de](http://www.doppelherz.de)