

# ROHTO® DRYAID® FRESH BOOST


Augentropfen

## Kühlender, erfrischender, aufweckender Effekt

⚠ **Dieser Beipacktext enthält wichtige Informationen zur Anwendung und Sicherheit Ihrer Augentropfen. Bitte lesen Sie den Beipacktext aufmerksam durch, bevor Sie die befeuchtenden DRY AID FRESH BOOST Augentropfen anwenden, und bewahren Sie ihn für ein späteres Nachlesen auf.**

### WAS SIND ROHTO DRY AID FRESH BOOST AUGENTROPFEN?

ROHTO DRY AID FRESH BOOST sind Augentropfen für einen kühlenden, erfrischenden Effekt bei der Anwendung für müde und trockene Augen. ROHTO DRY AID FRESH BOOST Augentropfen sind eine klinisch bewährte, innovative Rezeptur, welche trockene Stellen auf der Augenoberfläche bekämpft, die durch Aufreißen des Tränenfilms entstehen. Ihre TEARSHIELD TECHNOLOGY stellt den natürlichen Tränenfilm für langanhaltende Linderung und Schutz vor den Symptomen trockener Augen wieder her – eine Beschwerde, die durch einen zu geringen Tränenfilm entsteht. Es handelt sich um klare, kühlende, erfrischende Augentropfen für die vorübergehende Erleichterung bei trockenem, schmerzhaftem, juckendem, brennendem, stechendem, körnigem, müdem, gereiztem Gefühl, das von trockenen Augen verursacht wird. Trockene Stellen im Tränenfilm können durch eine Reihe von Auslösern hervorgerufen werden: zum Beispiel durch lange Bildschirmarbeitszeiten am Computer, Tablet oder Mobiltelefon, den Alterungsprozess, hormonelle Veränderungen (Menopause), eine Augenlaserooperation, beheizte Räume, Klimaanlage, Wind, Luftverschmutzung und bestimmte Arzneimittel. Aus Gründen des Komforts und der Wirksamkeit wurden ROHTO DRY AID FRESH BOOST Augentropfen darauf ausgelegt, natürliche Tränen zu ersetzen, und ihre Inhaltsstoffe wirken auf die verschiedenen Schichten des Tränenfilms ein, um diesen zu stabilisieren und seine natürliche Funktion wiederherzustellen. Dadurch werden die unangenehmen Symptome gelindert und das normale Sehvermögen wird wiederhergestellt.

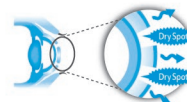

### WELCHE FUNKTIONEN HABEN ROHTO DRY AID FRESH BOOST AUGENTROPFEN?

Der Tränenfilm besteht aus einer Lipidschicht und einer Muzin-Wasserschicht. ROHTO DRY AID FRESH BOOST Augentropfen wirken auf alle Schichten ein. Es ist erwiesen, dass die Stabilisierung der Lipidschicht die Aufreißzeit des Tränenfilms wirksam verlängert. Einzigartige Inhaltsstoffe wurden ausgewählt, um die Eigenschaften des natürlichen Tränenfilms zu imitieren. Sesamol, Polyoxyethylen-Rizinusöl und Polyoxyethylenstearat unterstützen die Versorgung und Stabilisierung der Lipidschicht, welche die Stabilisierung der Tränenflüssigkeit begünstigt, und ihre Verdunstung verhindert. Povidon, Propylenglykol und Poloxamer wirken auf die Muzin-Wasserschicht ein, wodurch deren physiologische Funktionen, wie die Wasserspeicherung und Reibungsminderung, verbessert werden. Menthol sorgt bei der Anwendung der Augentropfen für ein kühlendes und erweckendes Gefühl. ROHTO DRY AID FRESH BOOST Augentropfen sind frei vom Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid.

### WAS ENTHALTEN ROHTO DRY AID FRESH BOOST AUGENTROPFEN?

Propylenglykol, Povidon, Borsäure, Natriumborat, Menthol, Calciumchlorid, Magnesiumsulfat, Polyoxyethylenstearat, Polyoxyethylen-Rizinusöl, Poloxamer, Dinatrium-EDTA, Sesamol, Polyhexamethylenbiguanid, gereinigtes Wasser

### HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

- Nur zur Anwendung am Auge.
- Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.
- Wenn Sie bei einem Arzt in Behandlung sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Nicht verwenden, wenn die transparente Kunststoffverpackung der Flasche beim Öffnen des Kartons beschädigt ist oder fehlt. ☹
- **Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden.**
- **Kontaktlinsen vor der Anwendung entfernen.**
- Warten Sie nach der Anwendung der Tropfen zumindest 15 bis 20 Minuten, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Teilen Sie sich dieses Produkt mit keiner anderen Person.
- Wenn Sie Irritationen oder andere unerwünschte Wirkungen verspüren, suchen Sie ärztlichen Rat.
- Die Lösung nicht schlucken.
- Lassen Sie zumindest 5 bis 10 Minuten verstreichen, bevor Sie andere Augenprodukte verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Spitze der Flasche mit den Augenlidern, den Augen oder anderen Oberflächen.
- Suchen Sie bei anhaltenden Symptomen einen Arzt auf.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### ANWENDUNGSHINWEISE

ROHTO DRY AID FRESH BOOST Augentropfen können zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Bedarf verwendet werden. Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen vor der Anwendung.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gründlich.
2. Drehen Sie den Verschluss, um diesen zu öffnen.
3. Entfernen Sie den Verschluss.
4. Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und blicken Sie nach oben.
5. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid sanft nach unten, sodass eine kleine Öffnung zwischen Augenlid und Auge entsteht.
6. Halten Sie die Flasche in der anderen Hand zwischen Daumen und Mittelfinger und üben Sie leichten Druck auf die Augentropfenflasche aus, sodass 1–2 Tropfen in die Öffnung fallen.
7. Wischen Sie etwaige überschüssige Flüssigkeit um das Augenlid herum mit einem faserfreien Tuch ab.
8. Die Kappe fest aufsetzen, um die Flasche zu verschließen.

### AUFBEWAHRUNG

- Zwischen 2°C - 30°C aufbewahren 30°C
- Nicht einfrieren.
- Nach Anbruch drei Monate verwendbar.
- Nach dem aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr verwenden. ☹
- Die Flüssigkeit in kein anderes Behältnis umfüllen.
- Vor Licht geschützt aufbewahren. ☹
- Überschüssige Flüssigkeit kann je nach Aufbewahrungsumfeld an der Flaschenspitze oder dem Verschluss kristallisieren. Wischen Sie die überschüssige Flüssigkeit in einem solchen Fall mit einem sauberen Tuch ab.

STERILE 10mL 0123

ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.  
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku,  
Osaka 544-8666, Japan  
Hergestellt in Japan  
Beilage: Deutsche Version.1 (06, 2025)



Vertrieb in Österreich und EU-Importeur:  
Sigmapharm Arzneimittel GmbH  
Leystrasse 129  
1200 Wien

EU | REP

MoNo chem-pharm Produkte GmbH  
Leystraße 129, 1200 Wien, Österreich

Model name: ROHTO DRY AID REFRESH for Tired + Dry Eye

PANTONE  
299 C

PANTONE  
Cool Gray 11C

K